

“OSTAR”

雲端血壓計簡易使用手冊



OSTAR 源星生醫科技股份有限公司

台北縣新店市民權路 46-4 號 5 樓 E-Mail : ostar@ostar.com.tw Tel : (02)2918-2390

1. 將 OSTAR 所研發之雲端血壓計傳輸線連接電腦以及血壓計，並將電子血壓計開機。

2. 請先打開 IE 瀏覽器，輸入 IAMOK 網址 <http://www.iamok.com.tw>，

執行雲端

可立即執行

3. 第一次 [執行雲端] 會有安全驗證並執行下載動作，呈現如下圖二畫面。




圖二 雲端下載

4. 若沒接上源星血壓計會呈現如下圖後，請立即接上源星血壓計，檢查傳輸線是否鬆脫，並再按 [再尋找一次血壓計]。




5. 請接上源星血壓計後，程式會找到血壓計，呈現如下圖三畫面

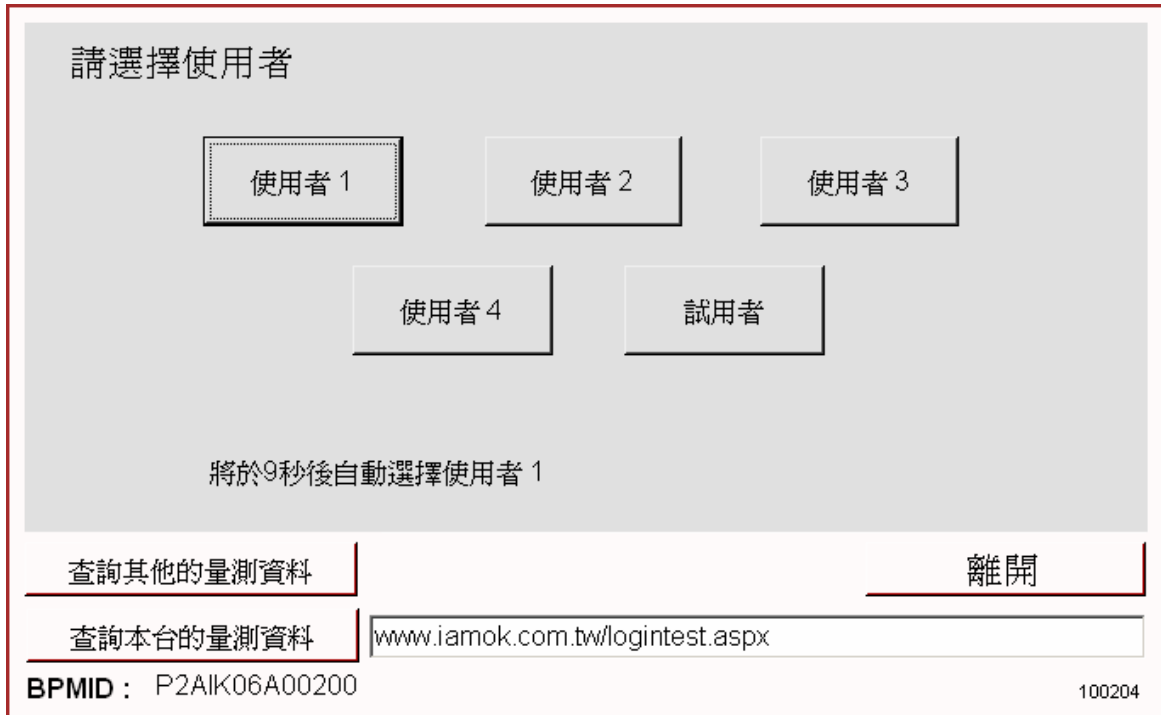

圖三 雲端程式-使用者 Interface

6. 可選擇 1~4 號使用者代號，若沒有點選則以 1 號為使用者代號。點選使用者後，呈現如下圖四的畫面，程式呈現測量血壓等待測狀態。

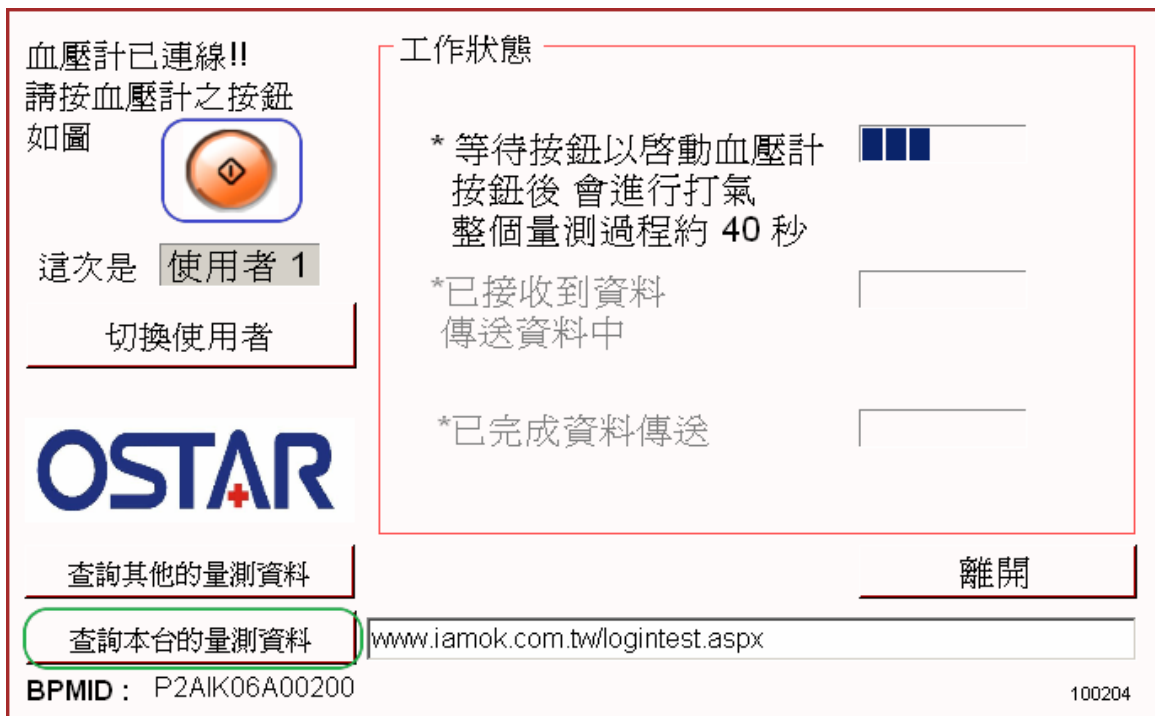

圖四 雲端程式-操作 Interface

OSTAR 源星生醫科技股份有限公司

台北縣新店市民權路 46-4 號 5 樓 E-Mail: ostar@ostar.com.tw Tel: (02)2918-2390

- 量測血壓時，可點選〔圖四〕的藍色圈內之按鈕，進行血壓量測。
- 量測血壓完畢後，可點選〔圖四〕的綠色圈內〔查詢本台的量測資料〕之按鈕，可觀測送至網路上的量測資料及問候語，如下〔圖五 A〕及〔圖五 B〕




〔圖五 A〕最近一筆量測資料之問候語




〔圖五 B〕血壓量測結果畫面

9. 可點選〔圖五 B〕的顏色球，顯示如下的此次血壓量測的資訊及血壓落點分佈圖

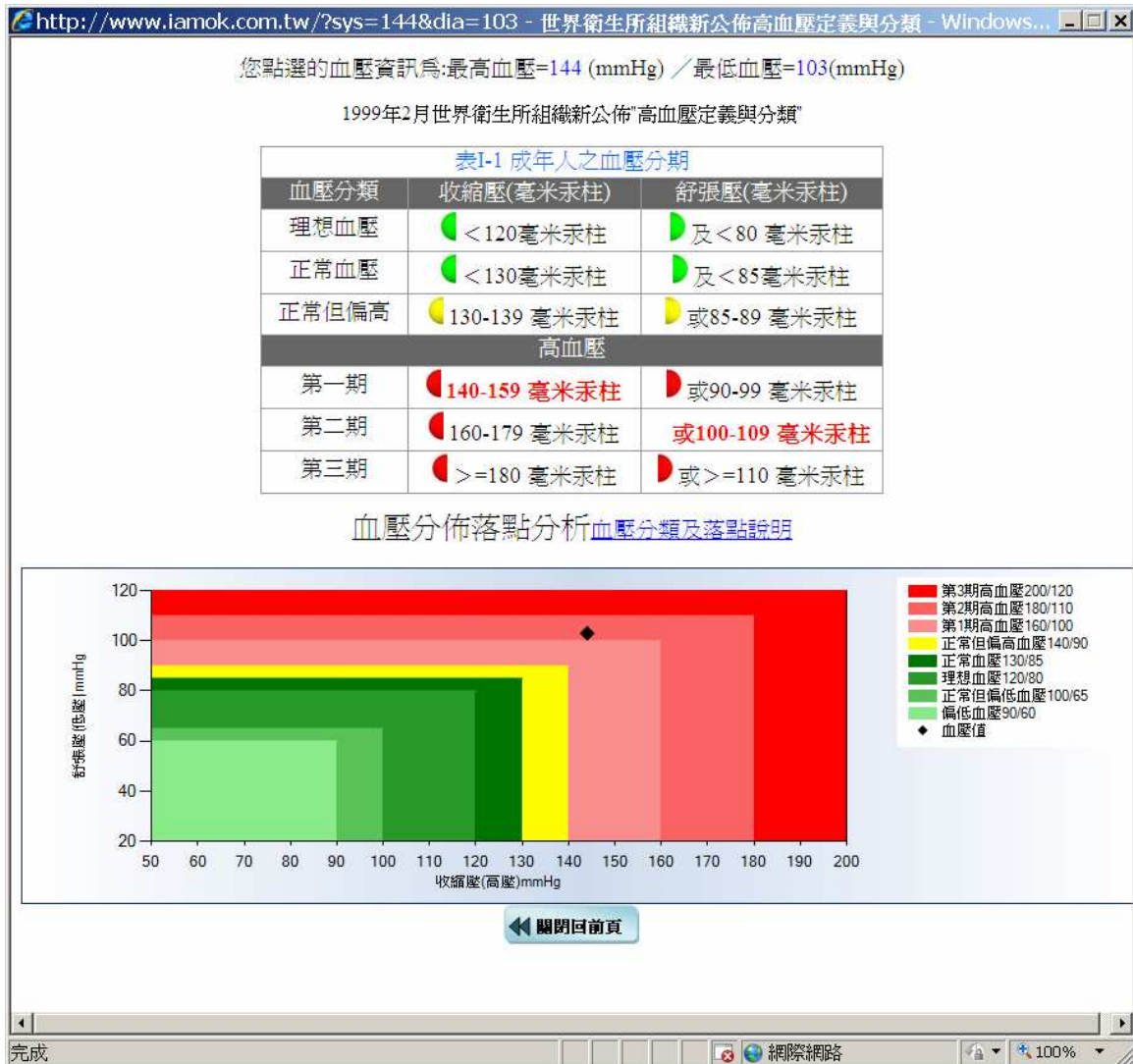


血壓落點分佈圖

10. 請點選 [圖五] [趨勢圖], 呈現如下 [圖六] 的血壓、脈搏的趨勢圖畫面。

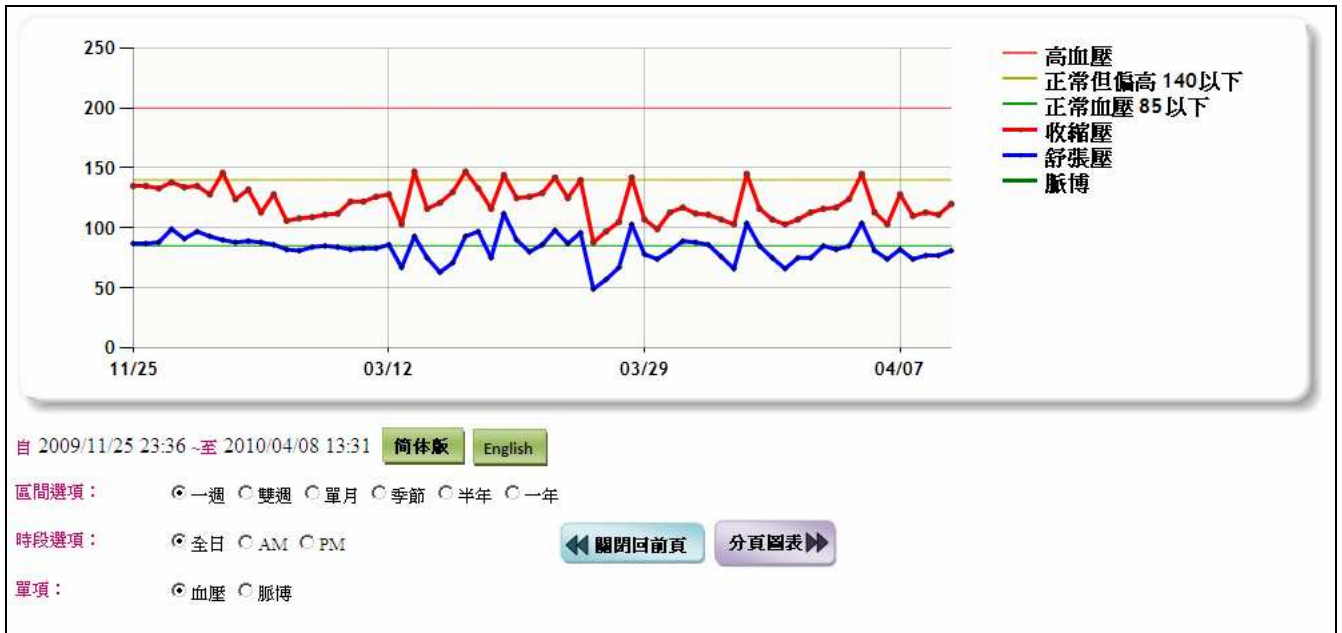


圖六 血壓生理值趨勢圖

9. [圖六] 的畫面, 可選擇各個區間選項, 如選 [單月], 再點選 [分頁圖表], 呈現如下畫面。

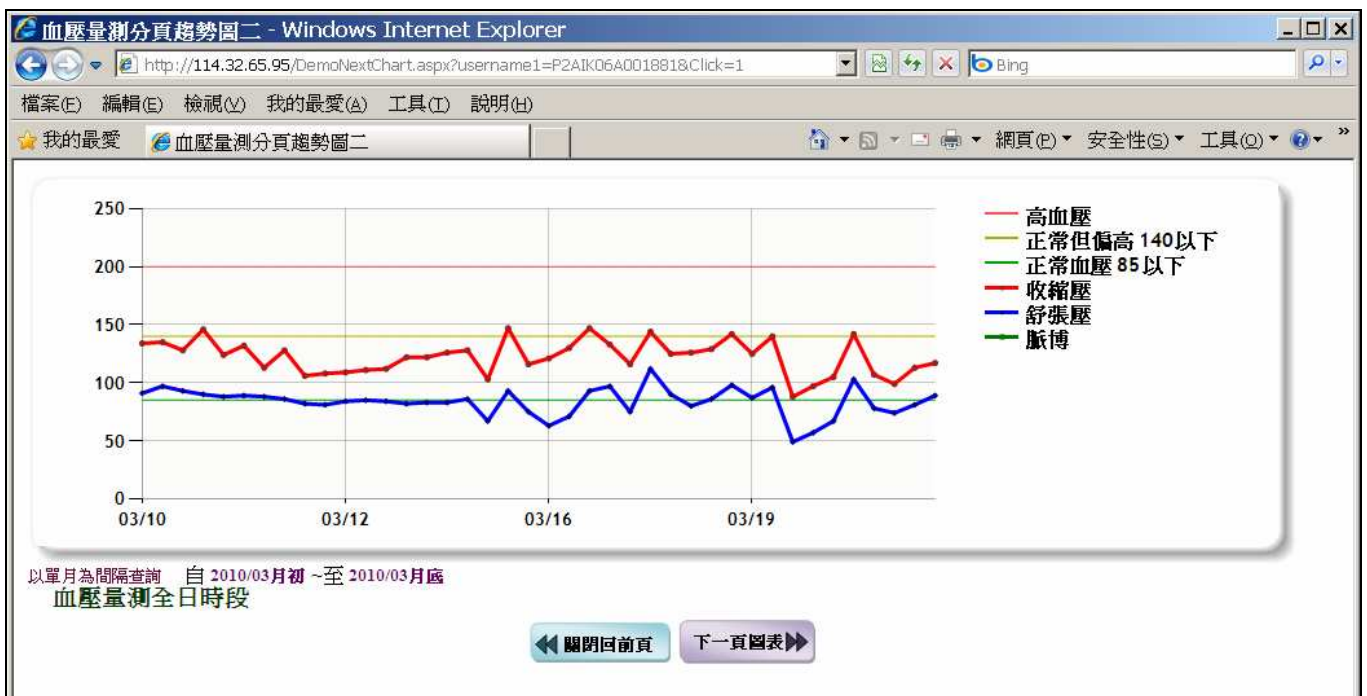

圖七 血壓生理值趨勢圖分頁圖表

10. 請點選 [圖五 B] 之 [心臟頻譜表]，呈現如下 [圖八] 的心臟頻譜值的趨勢圖畫面。

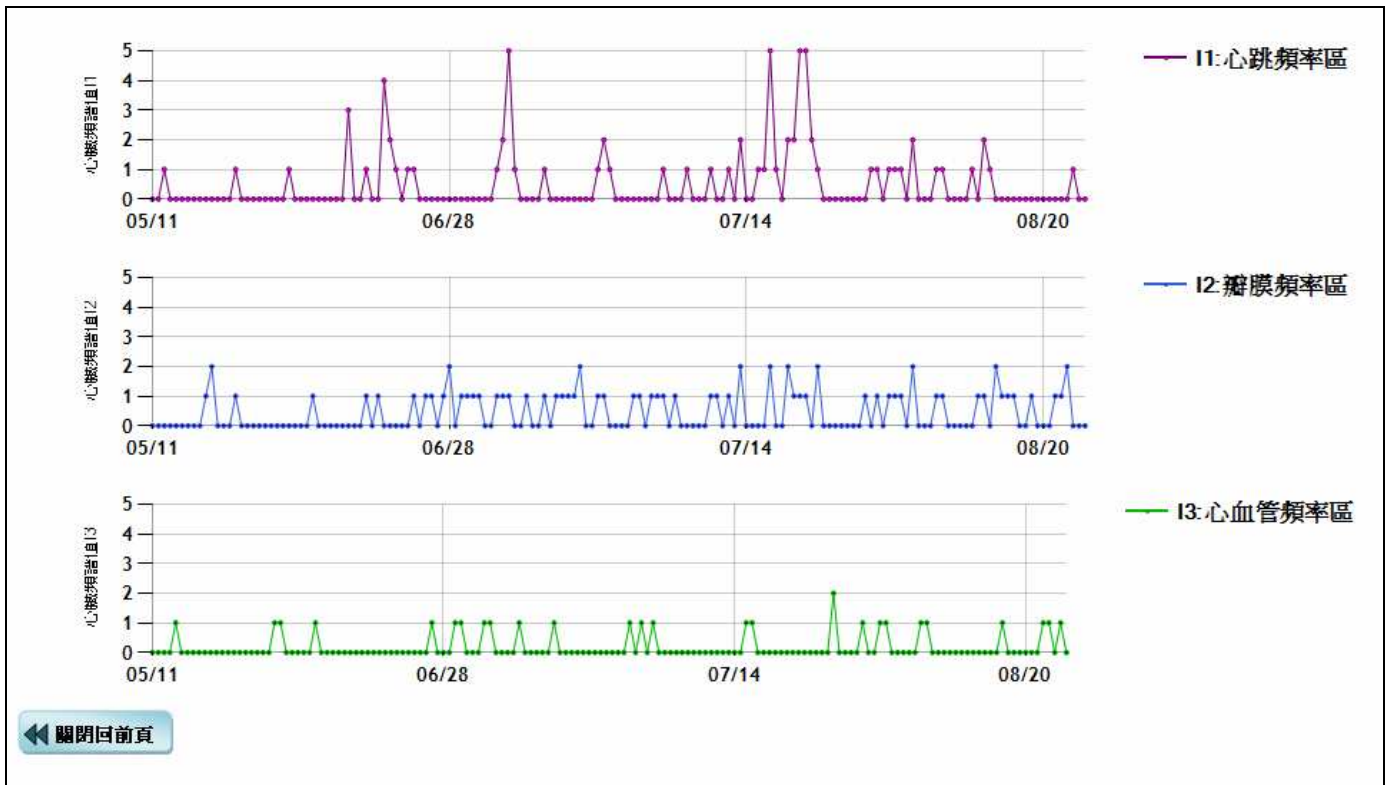

圖八 心臟頻譜值的趨勢圖